



# PINCE MI À COUDRE : INSTALLATION SUR MASQUES TISSU

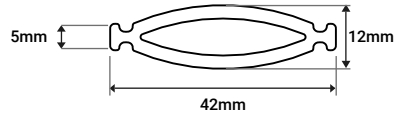

**TAILLE S :** Pour petits nez ou les enfants




**TAILLE L :** Taille adulte

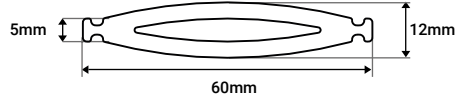

**Ne pas installer PINCE MI sur la face intérieure des masques**


## SOLUTION 1 : FOURREAU OUVERT

Coudre le fourreau ouvert sur l'avant du masque

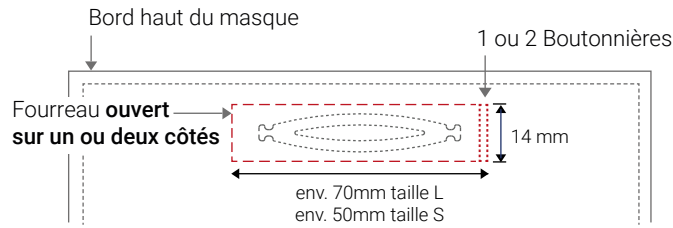

## SOLUTION 2 : FOURREAU FERMÉ

Coudre le fourreau fermé sur l'avant du masque

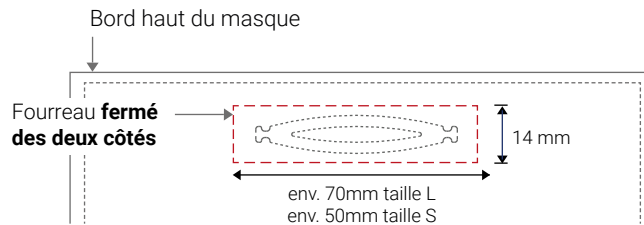


**Ne pas décontaminer le masque au micro ondes**

## SOLUTION 3 : COUSU MAIN

Recommandée uniquement si vous n'avez pas de machine à coudre ou si vous ne pouvez pas faire les solutions 1 et 2

Coudre le PINCE MI sur l'avant du masque (avec un fil solide)

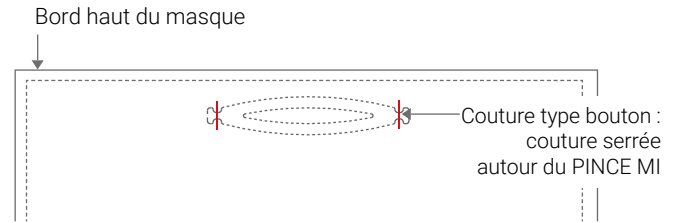

**Ne pas décontaminer le masque au micro ondes**

## UTILISATION DU PINCE MI À COUDRE



Préformez le PINCE MI à l'aide de votre doigt.  
Le PINCE MI doit être correctement plié (centré et pas trop pointu) sinon son efficacité est altérée.

× Non centré



Pliage correct

× Trop pointu



Installez le masque et ajustez le PINCE MI à la forme de votre nez en le pinçant

